

# Push CMC

**NEW**



# ORTHO

## ZACHOVANÁ MOBILITA A FUNKCE RUKY

1	16 – 19,5 cm
2	19,5 – 22,5 cm
3	22,5 – 26 cm

provedení: levá a pravá



Osteoartrtida CMC-1 (karpometakarpální kloub) je běžnou poruchou palce. Jedná se o typ „opotřebení“ kloubní chrupavky, k němuž dochází ve věku od 40 do 60 let. Míra výskytu v evropských zemích dosahuje 16 – 25 %. To znamená, že každý čtvrtý až pátý člověk trpí artrózou CMC.

Artróza kořenového kloubu palce ve spojení s oslabeným vazivem vede k nestabilitě funkčnosti. Tento stav obvykle vyvolává symptomy, jako např. bolest, snížená funkčnost ruky, slabost a ztuhlost. Palec vykonává přibližně 40 % všech funkcí ruky, takže artróza kloubu CMC může vést k omezením znemožňujícím používat ruku.

Společnost Push nyní uvádí na trh ortézu CMC palce, či zkráceně Push CMC. Tato nová koncepce se liší od standardních řešení. Push CMC stabilizuje

kořenový (karpometakarpální) kloub palce a zajišťuje umístění záprstí palce ve funkční poloze. Vytváří tak tzv. „oblouk palce“, který zůstává při pohybech ruky stabilní a zajišťuje správné uchopení. Zmírňuje bolest v případě, kdy je palec namáhán. Tato stabilizační metoda poskytuje volnost okolním kloubům včetně zápěstí. Cílem je zajistit nejlepší možnou funkčnost ruky.

Push CMC se skládá z válcovité části kolem kloubu palce a zpevněného spojení vinoucího se podél dlaně na vnější stranu ruky. Tuto část lze uzavřít v zadní části ruky dvěma nepružnými páskami. Válcovitá část sestává ze dvou dílů: hliníkové lišty a pružného a syntetického dílu. Hliníkovou lištu lze tvarovat a individuálně přizpůsobit k maximální stabilizaci kořene palce.



Vybrané materiály a zaoblené hrany zaručují maximální pohodlí. Jednoduchý zapínací systém umožňuje pacientům, aby si bandáž sami nasadili bez jakékoli námahy.

Push CMC je elegantní a kompaktní produkt. Bandáž lze použít i do vody. Je důležité udržovat kolem rukou hygienu. Syntetický materiál je tudíž antibakteriální a bandáž lze prát v pračce při teplotě 40°.

## “BANDÁŽ, NA KTEROU ČEKALO MNOHO RUKOU”



### INDIKACE

Osteoartrida CMC-1

Pooperační stav po artroplastice kloubu CMC-1

Nestabilita kloubu CMC-1



#### Judy C. Colditz

OT/L, CHT, FAOTA International hand therapy expert, President IFSHT





Push Brace CMC je důmyslný design, který diskrétně řeší problém bolesti osob s osteoartritidou CMC, včetně mne! Nadšeně ji nosím, protože je pohodlná, nemá funkční závady a je trvanlivá. Podle mých zkušeností jde o jedinou komerčně vyráběnou bandáž palce, která je nejdokonalejší ve srovnání s tím, co bych mohla pacientovi vytvořit podle jeho přání.



#### Nettie Koekebakker

PT/Certified Hand Therapist (NL), 4hands, private practice in hand therapy

CMC bandáž je převratem v léčbě artrózy CMC-1. Bandáž zajišťuje kloubu CMC-1 maximální podporu, přičemž dlaň, zápěstí a kloub MCP-1 zůstávají naprosto volné. Bandáž lze použít i při vodních aktivitách. Zkrátka: jedná se o jedinečnou, vysoce funkční a pohodlnou bandáž.

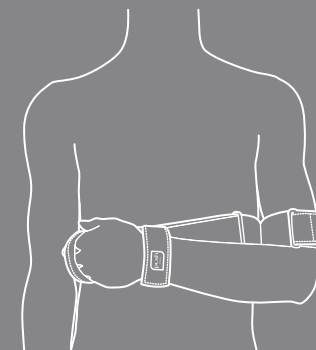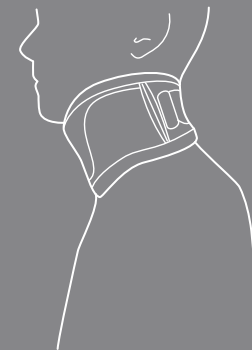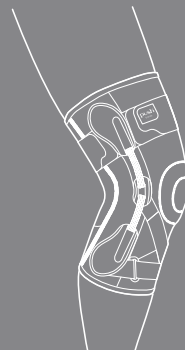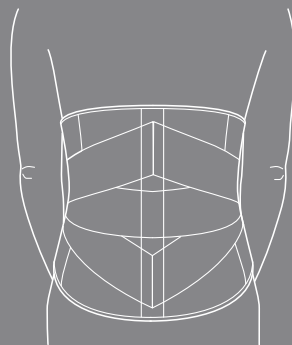

 **G.P.S. Ofa** s.r.o.

G.P.S. Ofa s.r.o.  
Fügnerova 1244  
CZ-25 228 Černošice  
Czech Republic

T 420 (0)2 51 64 21 65  
E [info@gps-ofa.cz](mailto:info@gps-ofa.cz)  
I [www.gps-ofa.cz](http://www.gps-ofa.cz)



[www.push.eu](http://www.push.eu)