


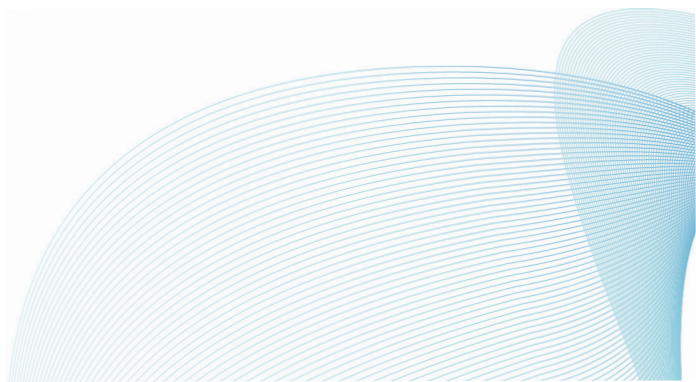

Návod K Obsluze Nahříváče

Model č.: V20-100/V20-200



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A
VĚNUJTE POZORNOST VÝSTRAŽNÝM SYMBOLŮM V TOMTO
NÁVODU I NA PŘÍSTROJI

Při práci s elektrickým spotřebičem je vždy potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

VAROVÁNÍ

- 1 Nahříváč je při použití a krátce po něm horký. Nedotýkejte se holou pokožkou horkého povrchu, mohlo by dojít k popáleninám.
- 2 Používejte pouze napětí uvedené na výrobním štítku spotřebiče.
- 3 Do větracích nebo výfukových otvorů nezasouvajte ani nenechte vniknout cizí předměty nebo kovové nástroje, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození přístroje.
- 4 Při přenášení uchopte nahříváč Formthotics V20 oběma rukama a držte jej zespodu, nikoliv za opěrku bot.
- 5 Pokud je jakýkoliv nahříváč používán dětmi nebo zdravotně postiženými osobami či v jejich blízkosti nebo pokud je ponechán v provozu bez dozoru, je potřeba mimořádná opatrnost.
- 6 Výrobek se nesmí používat jako hračka. Při použití mladými lidmi nebo v jejich blízkosti je třeba dávat velký pozor. Na děti je nutné dohlédnout, aby si s nahříváčem nehrály.
- 7 Tento nahříváč není určen pro použití dětmi nebo zdravotně postiženými osobami s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim k používání nahříváče nebyl poskytnut dohled nebo instrukce odpovědné osoby, aby bylo zaručeno, že jej mohou používat bezpečně.
- 8 Určeno pouze pro SUCHÉ prostředí. Nepoužívejte venku nebo na mokrému povrchu. Nepoužívejte v koupelnách, prádelnách a podobných vnitřních prostorech. Nahříváč nikdy nestavte tam, kde by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou. Neukládejte jej na místa, kde by se mohl namočit, ani do bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- 9 Části uvnitř nahříváče jsou horké. Nepoužívejte na místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy, hořlavé kapaliny nebo vysoké koncentrace prachu nebo kde se vyskytují páry těchto látek. Nepoužívejte společně s osvěžovači vzduchu a podobnými produkty nebo v jejich bezprostřední blízkosti.
- 10 Nestavte přímo pod síťovou zásuvku.
- 11 Při odpojování ze sítě netahejte za kabel. Chcete-li přístroj odpojit, nechopte jej za kabel, ale za zástrčku.
- 12 Nepoužívejte výrobek s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Je-li napájecí kabel poškozen, je nutné jej vyměnit, aby se předešlo riziku.
- 13 Při odpojování nahříváče jej nejprve vypněte ovládací prvky a potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nahříváč vytáhněte ze sítě pokaždé, když se nepoužívá.
- 14 Používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití než doporučené výrobcem může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

TERMOPLASTICKÉ STÉLKY FORMTHOTICS

Výrobky značky Formthotics jsou vyráběny z jedinečné tepelně tvarovatelné polyetylenové pěny, díky které se umí přizpůsobit tvaru konkrétní nohy a boty. Toto přizpůsobení lze plně využít pouze tehdy, pokud se produkt správně zahřeje a připraví tímto přístrojem a nijak jinak. K dosažení optimálních výsledků je nutné materiál správně zahřát, což je možné pouze s přístrojem, který je speciálně zkonstruován a otestován na správný výsledek. Všechny ostatní způsoby zahřívání stélek Formthotics jsou nevhodné a nedoporučují se.

Pro správné využití výrobků Formthotics je použití tohoto přístroje naprosto nezbytné.

Použití nahříváče Formthotics V20 a originálních stélek Formthotics je jediný spolehlivý a účinný způsob přizpůsobení tvaru a pohodlí moderní masově vyráběné obuvi tak, aby nohy a chodidla nositele mohly fungovat zdravým a účinným způsobem, jaký příroda zamýšlela. Moderní chodníky a masově vyráběné boty vytvářejí v celém chodidle, noze i zbytku těla škodlivé adaptační namáhání. Technologie v moderní obuvi může škodit, pokud se tvar a funkce bot nepřizpůsobí jedinečnému tvaru nohou a pohybovým schémátům nositele.

Vložky masově vyráběné lisováním nebo jednotlivě mimo boty nemohou správně propojit vlastnosti bot se strukturou a funkcí těla nositele. To je možné pouze se správně zahřátými a tepelně vytvarovanými **ORIGINÁLNÍMI** produkty **FORMTHOTICS**, které představují jedinou metodu přizpůsobení, jež přesně vytvoří hladké rozhraní mezi tělem a botou.

Vzhledem k materiálům, designu a výrobnímu procesu nelze žádné jiné výrobky zahřívát a tepelně tvarovat tak jako Formthotics.

NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj na žádné jiné výrobky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

Pro vaši bezpečnost je tento nahříváč opatřen automatickými vypínači, které se aktivují při přehřátí nahříváče. Pokud dojde k aktivaci vypínače, odpojte nahříváč a nechte jej vychladnout.

Před opětovným spuštěním nahříváče zkontrolujte, zda není někde ucpaný, případné překážky odstraňte a ověřte, že nahříváč stojí na pevném rovném povrchu. Pokud se nahříváč nepodaří znovu spustit, předejte jej do místa dodání k servisu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL NO	V20-100	V20-200
PROVOZNÍ NAPĚTÍ	100-120V~50-60Hz	230V~50Hz
SPOTŘEBA ENERGIE	550-800W	800W

Declaration of Conformity

We the undersigned

Manufacturer's Name: FOOT SCIENCE INTERNATIONAL LTD

Manufacturer's Address: 26 DAKOTA CRESCENT, WIGRAM, CHRISTCHURCH,
8042, NEW ZEALAND, +6433482115

Authorised Representative: FOOT SCIENCE INTERNATIONAL (UK) LTD

Certify and declare under sole responsibility that the following apparatus:

Description Formthotics Heating Machine

Model V20-200

Manufacturer Foot Science International Ltd

Complies with the essential requirements of the following EU directives, and carries the CE marking;

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU


Based on application of the following harmonised standards;

- EN60335-2-45:2002 + A1:2008 + A2:2011
- EN6100-6-1:2007
- EN61000-6-3:2007 + A1
- EN61000-3-2:2014
- EN61000-3-3:2013

Signed for and on behalf of Foot Science International Ltd on:

27 March 2019 in Christchurch, New Zealand

By:

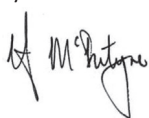

Hamish McIntyre
Process and Development Manager

O NAHŘÍVAČI


Nahřívač Formthotics V20 je zkonstruován tak, aby splňoval nejvyšší požadavky na kvalitu a funkčnost.

Je speciálně navržen k šetrnému nahřívání stélek Formthotics na optimální teplotu pro tvarové přizpůsobení podle nohy a boty. Má pouze jedno nastavení a jeho ovládání je velice jednoduché.


FUNKCE

- > Jednoduché tlačítkové ovládání
- > Opěrka bot zajišťující stabilitu během nahřívání
- > Zahřívací cyklus: 3 minuty
- > Udržovací cyklus: 3 minuty

PŘEDNÍ

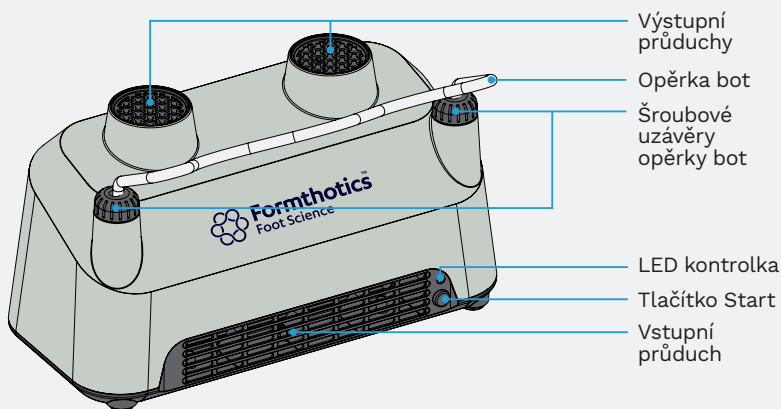


ZADNÍ

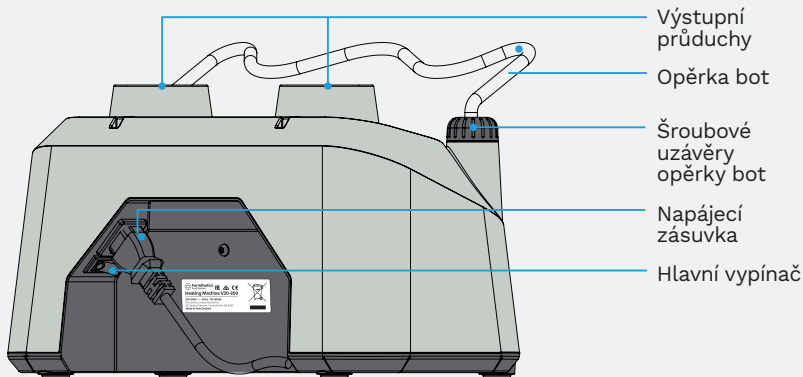

OBSLUHA

KROK 1

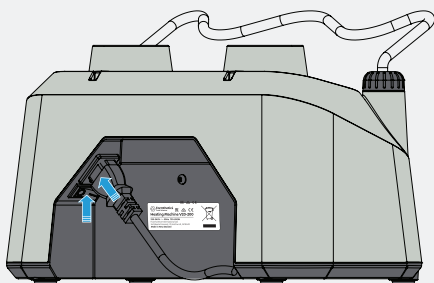


Zasuňte do napájecí zásuvky vhodný napájecí kabel a zapněte přístroj hlavním vypínačem (On/Off).

Postavte nahřívač Formthotics V20 na stabilní rovný povrch. Před přístrojem a po jeho stranách ponechte alespoň 10 cm místa.


Zkontrolujte, že napájecí napětí nahřívače Formthotics V20 odpovídá vašemu síťovému napětí (100 V - 120 V nebo 230 V). Pokud ne, přístroj nezapojte a neprodleně si jej vyměňte za správnou verzi.

KROK 2A

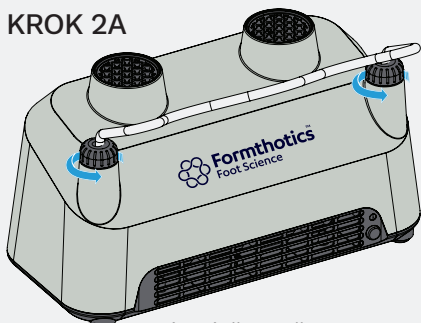


Povolte šroubové uzávěry opěrky bot otočením o půl otáčky proti směru hodinových ručiček.

KROK 2B

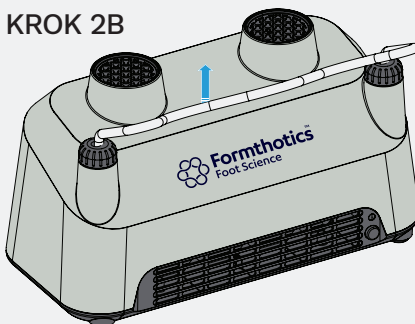

Nastavte opěrku bot na požadovanou výšku.


KROK 2C

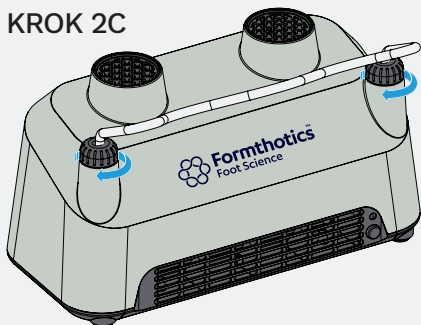

Po nastavení do správné polohy utáhněte šroubové uzávěry otočením o půl otáčky ve směru hodinových ručiček.

Vyndejte z bot všechny případné vložky a vložte do nich stélky Formthotics. Položte boty hlavou dolů na horní stranu nahřívače Formthotics V20 tak, aby se otvor boty nacházel nad výstupním průduchem a špička se opírala o opěrku bot.


KROK 3A

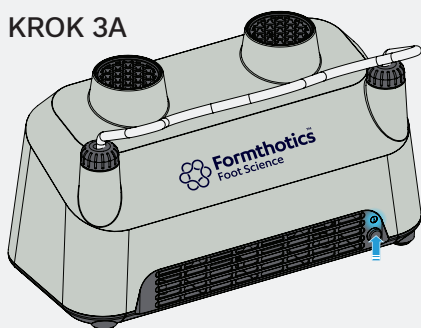

Stiskněte tlačítko Start.

Barva LED kontrolky se změní ze zelené na modrou, což signalizuje zahájení zahřívacího cyklu.

KROK 3B

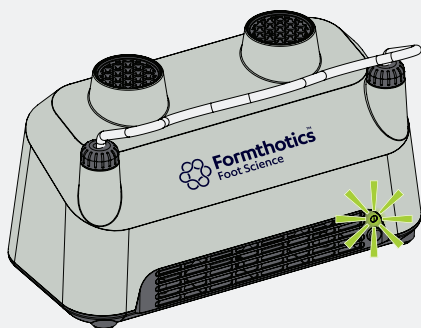


Po 3 minutách začne LED kontrolka blikat zeleně a ozve se zvukový signál, což znamená, že nahřívač zahájil udržovací cyklus určený k udržování teploty stélek Formthotics. V případě potřeby můžete každý cyklus opětovným stiskem tlačítka kdykoliv přerušit.

Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.

Poznámka: Výstupní průduchy a horní plocha přístroje mohou být horké.

KROK 4

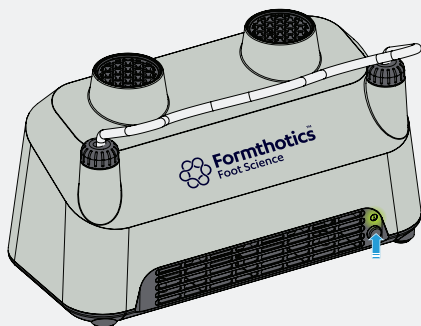

Sejměte boty, ihned je nasadte zákazníkovi a nechte jej v nich stát po dobu 2–3 minut, aby se stélky Formthotics mohly vytvarovat podle nohy a boty.

Vypněte hlavní vypínač.

Přístroj je určen výhradně k zahřívání výrobků Formthotics. Nepoužívejte jej k žádným jiným účelům ani pro jinou značku vložek či stélek.

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Společnost Foot Science International poskytuje na tento výrobek záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním. Pokud se během tohoto období objeví vada výrobku, bude výrobek bezplatně opraven nebo vyměněn. Opravu tohoto výrobku nemůže provádět uživatel, k servisu jej prosím předejte v místě dodání.

Likvidace: Na konci životnosti výrobku by bylo vhodné jej recyklovat nebo vrátit místnímu distributorovi k demontáži.



Foot Science International Ltd
26 Dakota Crescent, Sockburn
Christchurch 8042, Nový Zéland

Tel +64 3 348 2115

Email info@formthotics.com

Navštivte stránku formthotics.com

Distribuce pro ČR:

GPS Ofa s.r.o., Jitřní 2283
252 28, Černošice

Tel +420 251 642 165

Email info@gps-ofa.cz

Navštivte stránku formthotics.cz